

**Інструкція**  
**для медичного використання**  
**Буфер фосфатний для аналізаторів Ексан**  
РН розчину = 7,2÷7,4

**Реагенти допоміжні для клінічних лабораторних досліджень**  
**ТУ У 24.4-20650786-003:2009**

**Склад :**

натрію гідрофосфат - 24±5 мМоль;  
калію дигідрофосфат - 6±2 мМоль;  
калію хлорид - 100±5 мМоль;  
Трилон Б - 1,00±0,1 мМоль.

**Спосіб застосування**

Вміст флакону розчинити в 1л дистильованої води. Застосовувати відповідно до інструкції по використанню аналізатору «Ексан». Використати на протязі 7 днів.

**Умови та термін зберігання**

Буфер фосфатний зберігається в захищеному від світла місці при температурі +2+25°C. Термін придатності – 36 місяців. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

**Упаковка**

По 12 г суміші реактивів у флаконах ФВП упакованих по 5 флаконів у коробках картонних.

**Виробник:** ТОВ “Генезіс”, Україна.

**Адреса:** 27503, м.Світловодськ, Кіровоградська обл., вул.Єгорова, 41.