

Інструкція
для медичного використання
Желатину розчин 10%

Реагенти допоміжні для клінічних лабораторних досліджень
ТУ У 24.4-20650786-003:2010

Склад :

10 мл розчину містять желатину медичного 1 г;
допоміжні речовини: розчин натрію гідроксиду, натрію хлорид, вода дистильована.

Спосіб застосування

Ампулу з розчином желатину перед застосуванням необхідно підігріти на водяній бані при температурі 48°C до розрідження вмісту.

Використовувати розчин желатину згідно з уніфікованими методиками визначення резус-фактора методом конглютинації.

Розкриті ампули зберігати в холодильнику не більше 3 днів. Каламутний або не застигаючий при кімнатній температурі розчин желатину не використовувати.

Умови та термін зберігання

Желатину розчин 10% зберігається в прохолодному, захищеному від світла місці при температурі +2+8 °С. Термін придатності – 12 місяців.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Упаковка

По 10 мл розчину в ампулах ІІІ-10 упакованих по 10 ампул у коробках картонних.

Виробник: ТОВ “Генезіс”, Україна.

Адреса: 27503, м.Світловодськ, Кіровоградська обл., вул.Єгорова, 41.