

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного використання**  
**Тести контролю температурних режимів стерилізації**

Тести контролю температурних режимів стерилізації та передстерилізаційного очищення ТУ У  
24.4-20650786-006:2009

Кількість термоіндикаторів в упаковці: 100 шт.

Реактиви, що використовуються в термоіндикаторах представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

<b>Найменування тесту</b>	<b>Реактив</b>
ТІ-110	резорцин
ТІ-120	бензойна кислота
ТІ-132	сечовина
ТІ-160	саліцилова кислота
ТІ-180	тіосечовина

1. Візуально упевніться у відсутності механічних пошкоджень термоіндикаторів, струсіть їх, змістивши їх вміст до любого кінця трубки, заверніть в серветку і розмістіть в біксах і стерилізаторі згідно інструкції на стерилізатор.

Пошкоджені, з тріщинами термоіндикатори не використовувати!

2. Після стерилізації витягніть всі термоіндикатори та проведіть їх візуальний огляд.

3. При задовільному результаті контролю температури агрегатний стан вмісту термоіндикатору зміниться від сипучого до несипучого, а колір згідно таблиці 2.

Таблиця 2

<b>Найменування тесту</b>	<b>Колір вмісту до дії температури</b>	<b>Колір вмісту після дії температури</b>
ТІ-110	рожевий	червоно-коричневий
ТІ-120	блідо-блакитний	синій
ТІ-132	від жовтого до рожевого	малиновий
ТІ-160	блідо-коричневий або блакитний	від фіолетового до синього
ТІ-180	білий	жовтий

4. При незадовільному результаті контролю температури стерилізацію повторити.

5. При виявленні механічних пошкоджень термоіндикаторної трубки вміст бікса повторно вимити, обробити і простерилізувати.

**Виробник:** ТОВ «Генезіс», Україна

**Адреса:** 27503, м.Світловодськ, вул. Єгорова, 41